

# Odgryzacze kostne SQ.line® KERRISON


## So Qlean!

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE


### 1 | Demontaż



1 Zamknij przedni uchwyt.

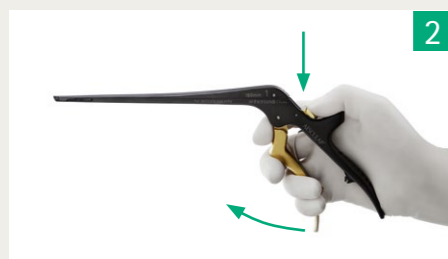

2 Naciśnij do oporu złotą zapadkę i zwolnij uchwyt.

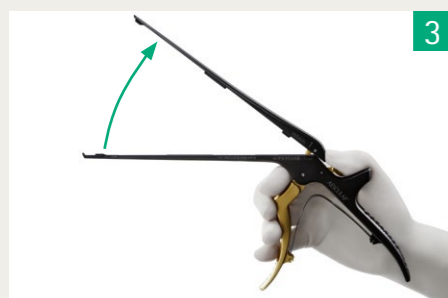

3 Otwórz górną branszę.

### 2 | Czyszczenie




Aby wyczyścić odgryzacze kostne, umieść je na tacy w pozycji otwartej.



Odgryzacze przeznaczone do czyszczenia możesz też umieścić na stojaku SQ.line® KERRISON (JF125R lub JF126R).

### 3 | Konserwacja

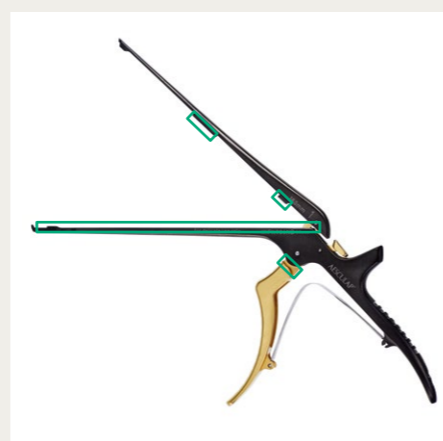

Części ruchome (zawiasy, zatrzaski i powierzchnię stykową elementów przesuwnych) nasmaruj przepuszczalnym dla wilgoci i umożliwiającym sterylizację olejem do konserwacji narzędzi (JG598 lub JG600).




### 4 | Montaż



1 Zamknij górną branszę.



2 Zamknij i zwolnij przedni uchwyt.

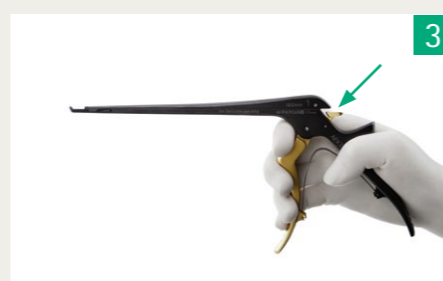

3 Złota zapadka zamknie się samoczynnie.

### 5 | Sprawdzenie działania



Sprawdź, czy odgryzacze kostne działają prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym serwisem technicznym (ATS).

+48 61 442 03 00

ats.acp@bbraun.com

### 6 | Przechowywanie



Odgryzacze przechowuj w pozycji zamkniętej na tacy lub na stojaku SQ.line® KERRISON (JF125R lub JF126R).

### 7 | Sterylizacja



Szczegółowe informacje przedstawiono w broszurach:

- C72902 SQ.line® KERRISON
- C84802 Prawidłowa konserwacja przyrządów
- C63402 System przechowywania narzędzi Aesculap InOS®  
Zatwierdzone procedury reprocusowania



Przestrzegaj instrukcji obsługi (TA018250).

<https://eifu.bbraun.com/eIFU/TA018250>