



SKÓRA



# Alcohol<sup>®</sup> Pads

GAZIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, DO DEZYNFEKCJI SKÓRY

# Alcohol<sup>®</sup> Pads

## GAZIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, DO DEZYNFEKCJI SKÓRY

### OBSZAR ZASTOSOWANIA

Oczyszczanie i dezynfekcja nieuszkodzonej skóry pacjenta w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach, punktach szczepień i innych jednostkach związanych z branżą medyczną oraz w opiece domowej.

### PRZEZNACZENIE

- Gotowe do użytku, jednorazowe gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry pacjenta w opiece domowej, ambulatoryjnej i szpitalnej
- Dezynfekcja małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- Do użytku zewnętrznego; stosować jednokrotnie

### SPOSÓB UŻYCIA

Gazik należy wyjąć z saszetki i zdezynfekować powierzchnię przez przetarcie. Po zastosowaniu wyrzucić.



### WŁAŚCIWOŚCI

- Gaziki Alcohol Pads są nasączone 70% alkoholem izopropylowym, substancją o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym
- Posiadają optymalny do przeznaczenia wymiar umożliwiający łatwe użycie: gazik złożony : 32.5 × 30 mm, gazik rozłożony: 65.0 × 30 mm
- Praktyczne i wygodne, gotowe do użycia, w jednorazowych saszetkach
- Wysokiej jakości włóknina polipropylenowo-celulozowa, nie strzępi się, nie pozostawia włókien
- Miękką, przyjemną w dotyku włóknina, posiada bardzo dobre właściwości chłonne
- Skutecznie oczyszcza zdezynfekowaną powierzchnię i skórę, gwarantują czystość odpowiedniego obszaru
- Doskonała tolerancja skórna
- Pakowane hermetycznie, w pojedynczych saszetkach, 100 szt. w kartonie
- Wygodne w użyciu i transporcie
- Zapobiegają rozprzestrzenianiu się patogenów chorobotwórczych (skuteczna profilaktyka chorób infekcyjnych)
- Produkt zarejestrowany jako kosmetyk

### Dostępne opakowania

### Nr katalogowy

Alcohol Pads

9160612

Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 64-300 Nowy Tomyśl | ul. Tysiąclecia 14  
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | [www.bbraun.pl](http://www.bbraun.pl)

Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun

OPM-IC-027 10/09/2021