



SKÓRA



RANY



Askina® Barrier Film

POLIMEROWA BARIERA OCHRONNA SKÓRY

Askina® Barrier Film

POLIMEROWA, PIELĘGNUJĄCA I OCHRONNA BARIERA SKÓRY.
SZYBKO SCHNĄCA, PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE.

WSKAZANIA

- Produkt jest przeznaczony, jako bariera ochronna do użycia na zdrową lub uszkodzoną skórę (możliwość stosowania również do skóry delikatnej i wrażliwej)
- Chroni przed drażniącym działaniem wydaliny i wydzieliny pacjenta (ochrona skóry pacjenta z inkontynencją)
- Zabezpiecza skórę wokół ran i stomii
- Pod opatrunki, w celu zabezpieczenia skóry przed uszkodzeniami przy zdejmowaniu opatrunku
- Do miejsc zamocowania drenów i cewników
- Ochrona miejsc wrażliwych, takich jak: pięty, łokcie, palce stóp, biodra – przed otarciem
- Na małe rany i otarcia skóry

WŁAŚCIWOŚCI

- Nie powoduje podrażnień, możliwość stosowania na uszkodzoną skórę
- Szybko wysycha – poniżej 30 sek.
- Nie wysusza, umożliwia oddychanie skóry
- Przezroczysty, umożliwia kontrolę wizualną skóry
- Łatwy do usunięcia
- Poprawia przyleganie opatrunków i plastrów mocujących
- Nie ogranicza skuteczności / wchłaniałości stosowanych wkładek higienicznych / pielucho-majtek
- Bezproblemowe użycie (nie utrudnia przyklejania) sprzętu stomijnego
- Możliwość stosowania u niemowląt pow. 3 miesiąca życia
- Wysoce wydajny – do 140 aplikacji z jednego opakowania
- Bariera ochronna utrzymuje się przez 48-72 h

SPOSÓB UŻYCIA

Umyć skórę z użyciem odpowiedniego mydła (np. Softaskin) a następnie delikatnie osuszyć. Spryskać skórę z odległości 10 – 15 cm nakładając polimerową warstwę ochronną.

Przed nałożeniem sprzętu stomijnego / opatrunku odczekać ok. 30 sekund do wyschnięcia.

W razie konieczności produkt można usunąć za pomocą medycznych zmywaczy do skóry (np. Adhesive Remover Spray) lub delikatnej emulsji myjącej.



Dzień 1



Dzień 15

Przykład użycia Askina Barrier Film do pielęgnacji skóry wokół stomii.

Dostępne opakowania	Numer katalogowy
Askina Barrier Film	4002801

Skład: Disiloksan, kopolimer akrylowy

Wyrób medyczny klasa I

CE 0050

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESULAP CHIFA – firma grupy B. Braun