



RANY



Prontosan[®] Debridement Pad

NOWOCZESNE OCZYSZCZANIE RANY

Prontosan® Debridement Pad

DELIKATNE OCZYSZCZANIE RANY, USUWANIE MARTWICY, WŁÓKNIKA, BIOFILMU

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony do oczyszczania ran zakażonych i niezakażonych w praktyce medycznej, warunkach ambulatoryjnych i w opiece domowej.

PRZEZNACZENIE

Prontosan Debridement Pad jest sterylnym produktem przeznaczonym do optymalnego oczyszczania łożyska rany z wykorzystaniem płynu Prontosan. Zbudowany jest z przedniej warstwy oczyszczającej pokrytej mikrowłóknami i tylnej warstwy chłonnej. Pad oczyszcza ranę z włókniaka, martwicy, zanieczyszczeń nieorganicznych oraz pochłania nadmiar wysięku. Nie narusza ziarninującej tkanki, minimalizuje ból podczas mechanicznego oczyszczania rany. Doskonałe rezultaty w usuwaniu martwicy i włókniaka przy użyciu produktu osiąga się po wcześniejszym leczeniu autolitycznym z wykorzystaniem produktów Prontosan Gel / Prontosan Gel X.

Każdy Prontosan Debridement Pad przeznaczony jest do jednokrotnego użytku.

JAK DZIAŁA MIKROFIBRA

Włókna mikrofibry posiadają stukrotnie mniejszy przekrój od włókien monofilamentowych. Prontosan Debridement Pad pokryty jest milionami włókien mikrofibry tworzących „ogromną” w stosunku do powierzchni pada powierzchnię czyszczącą.

Mechanizm działania włókien mikrofibry jest dwójaki:

- następuje mechaniczne wiązanie struktur biofilmowych, fragmentów martwicy, cząstek włókniaka
- mikrowłókna wykazują także oddziaływanie elektrostatyczne.

Synergia tych dwóch mechanizmów tworzy bardzo skuteczną metodę eliminacji zarówno charakterystycznych dla biofilmu i martwicy struktur hydrofobowych, jak i zanieczyszczeń ran o charakterze hydrofilowym.




WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie i delikatnie oczyszcza łożysko rany i skórę wokół rany dzięki zastosowanej technologii mikrofibry
- Usuwa z rany włókniak oraz suchą i rozpułwną martwicę
- Absorbuje nadmiar wysięku z rany
- Nie narusza ziarninującej tkanki
- Minimalizuje ból podczas oczyszczania rany
- Ergonomiczny kształt „kropli” umożliwia oczyszczenie powierzchni trudno dostępnych
- Specjalne opakowanie blistrowe umożliwia aseptyczne nawilżenie padu przed użyciem.
- Produkt sterylny

SPOSÓB UŻYCIA

Nieoznakowaną logiem B. Braun stronę pada nawilżyć 15-20 ml roztworu do irygacji ran Prontosan roztwór.* Jeśli istnieją inne lokalne wytyczne, dotyczące oczyszczania ran, należy ich przestrzegać. Delikatnie naciskając, ruchami okrężnymi oczyścić zwilżoną stroną pada ranę i przylegającą do rany skórę.

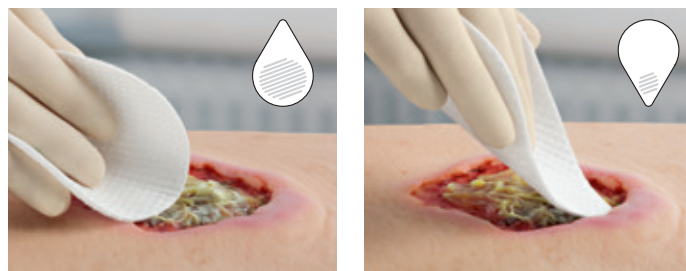

Po oczyszczeniu rany zalecane jest nawilżenie rany preparatem Prontosan roztwór oraz kontynuowanie standardowego leczenia.

* w przypadku, gdy Prontosan nie jest dostępny, podkładka może być nawilżona fizjologicznym roztworem chlorku sodu

Dostępne opakowania	Numer katalogowy
Opakowanie 3 szt	3908456
Opakowanie 10 szt	3908457

Wyrób medyczny klasy I s

CE 0123

Skład:

Elastyczna, cienka warstwa oczyszczająca zbudowana jest z polipropylenu/poliestru. Warstwa chłonna z polipropylenu.

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: (61) 44 20 100 | fax: (61) 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESCULAP CHIFA – firma grupy B. Braun

OPM-IC-112

10/09/2021